



# Augen-Notfallplan

SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLLÖSUNG	FORTSETZUNG DER SPÜLUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG	EMPFOHLENE SPÜLUNG
<b>Fremdkörper</b> (z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter)	<b>Plum Augenspüllösung</b>	<b>Plum Augenspüllösung</b>	Augen solange spülen bis die Fremdkörper herausgespült sind.
<b>Säureschäden</b>	<b>pH Neutral</b>	<b>Plum Augenspüllösung</b>	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
<b>Alkalische Schäden</b>	<b>pH Neutral</b>	<b>Plum Augenspüllösung</b>	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
<b>Sonstige Schäden</b> (z.B. Lösemittel und Öle)	<b>Plum Augenspüllösung</b>	<b>Plum Augenspüllösung</b>	Augen solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
<b>Schäden auf der Haut</b> durch Säuren, Alkali und Chemikalien	<b>pH Neutral</b>	<b>Plum Augenspüllösung</b>	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



pH Neutral



Plum Augenspüllösung



Nehmen Sie die Flasche aus der Box.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.



Den Kopf nach vorne beugen und spülen wenn Ihre Kleidung nicht nass werden soll.

## Wichtig!

Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.



# Førstehjælpsplan øjenulykker

SKADESTOF	ØJENSKYLNING	FORTSAT SKYLNING	SKYLLETID
<b>Fremmedlegemer</b> (f.eks. støv, snavs, metal- og træsplinter)	<b>Plum Øjenskyller</b>	<b>Plum Øjenskyller</b>	Skyl til fremmedlegemet er skyllet ud.
<b>Syreskader</b>	<b>pH Neutral</b>	<b>Plum Øjenskyller</b>	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen.
<b>Alkaliske skader</b>	<b>pH Neutral</b>	<b>Plum Øjenskyller</b>	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen.
<b>Andre skader</b> (f.eks. opløsningsmidler og olier)	<b>Plum Øjenskyller</b>	<b>Plum Øjenskyller</b>	Skyl indtil ubehaget forsvinder og fortsæt skylningen frem til lægen.
<b>Skader på huden</b> (fra syrer, baser og kemikalier)	<b>pH Neutral</b>	<b>Plum Øjenskyller</b>	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom. Fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller til ubehaget forsvinder eller frem til lægen.



pH Neutral



Plum Øjenskyller



1. Flasken taget vandret ud af holderen



2. Øjenkoppen drejes til forseglingen brydes.



3. Læn hovedet bagover og skyl



4. Læn dig eventuelt frem og skyl

## Vigtigt!

Ved alle skadetyper skal øjenskyllervæsken ramme øjet i en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den. Kontakt altid en læge og fortsæt skylningen under transporten.